

Bischoff & Bischoff

Bedienungsanleitung

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen)

Typ: B+B Duschocker DH-40/L

Seriennummer: *
(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

DH-40/L



Bischoff & Bischoff GmbH


Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 7248/9209-2 • Fax: +49 7248/9209-3

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

Enjoy mobility.

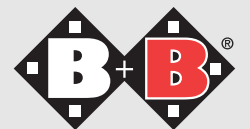

DH-40/L (Duschhilfe)

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieser B+B Duschhilfe verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das sich schon tausendfach im professionellen Einsatz bewährt hat.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Duschhilfe besser vertraut und somit sicherer machen.


Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt.

1. Achtung - Sicherheitshinweis - Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485

- Max. Belastbarkeit 110 kg
- Alle 4 Außenfüße auf die gleiche Höhe einstellen
- Auf korrekten Sitz der Arretierknöpfe achten
- Auf festen Sitz der Sitzflächenbefestigungsschrauben achten
- Auf korrekten Sitz der Rückenlehne achten.



Fußteil A

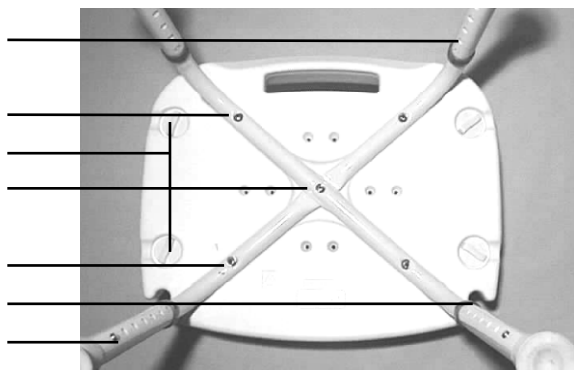

Befestigungsschrauben

Schrauben für Haltegriffe

Fixierschraube (längste Schraube)

Befestigungsschrauben

Fußteil B

Arretierknopf für
Höhenverstellung

1. Montage der Füße A+B

Legen Sie den Sitz mit der unteren Seite vor sich hin (Abb.1). Nehmen Sie die Fußteile A + B, legen sie kreuzweise übereinander (Gummifüße nach oben, abgeflachte Paßstellen müssen ineinander greifen) und fixieren beide Fußteile mit Hilfe einer Schraube (Fixierschraube mit Unterlegscheibe und Sicherungsring) in der Mitte des Sitzes. Mit der längsten Schraube fixieren Sie die Mitte des Duschhockers. Nun richten Sie die Fußteile so aus, daß Sie mit den verbliebenen vier Schrauben (mit Unterlegscheiben) die Fußteile A + B am Sitz befestigen können.

Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen!

2. Montage der Rückenlehne (nur DH-40/L)

Drücken Sie die Rückenlehne (Abb.3) mit der anatomisch geformten Seite nach innen in die dafür vorgesehene Ausnehmung (Abb. 2).



Wichtiger Hinweis

Das Unterteil der Rückenlehne muß ca. 5mm aus der Sitzunterseite herausragen!



Abb. 2



Abb. 3

3. Einstellen der Sitzhöhe

Beide Fußteile sind höhenverstellbar. Drücken Sie die Arretierknöpfe (Abb.1) hinein und bringen Sie die Außenfüße auf die gewünschte Höhe. Die Sitzhöhe ist 8-fach einstellbar.



Achten Sie darauf, daß die Arretierknöpfe wieder einrasten!

Schieben Sie anschließend die Gummidichtungen über die Außenfüße.



Alle vier Außenfüße müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden!

Der Duschhocker wird mit rutschsicheren Gummifüßen geliefert. Auf Wunsch sind Saugfüße erhältlich.

4. Befestigung der Seitengriffe

Griffe von oben in die dafür vorgesehenen Aussparungen stecken und von unten mit den Schrauben (Abb.1) befestigen.



Schrauben auf festen Sitz prüfen.

5. Begeistigen des Duschkopfes am Duschhocker

An der Vorderseite des Dusch-hockersitzes befinden sich an den Außenseiten zwei Duschkopfaufnahmen, in welche man den Duschkopf während der Körperpflege plazieren kann.

6. Reinigung des Duschhockers

Die Reinigung des Duschhockers nur mit milden, handelsüblichen Reinigungsmitteln vornehmen.

7. Technische Daten

Max. Belastbarkeit:	110 kg
Sitzbreite:	50 cm
Sitzhöhe:	40 - 57 cm (78 - 95,5 cm)
Sitztiefe:	40 cm
Gewicht DH 40 (L):	4,1 kg