


# **Bischoff & Bischoff**


Bedienungsanleitung

## **TSE-Easy 10**



**Enjoy mobility.**

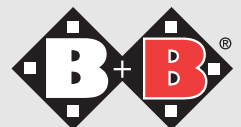

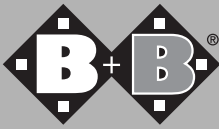

## **TSE-Easy 10 (Toilettensitzerhöhung)**

### **Sehr geehrter Kunde,**


mit dem Erwerb dieser B+B Toilettensitzerhöhung verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das sich schon tausendfach im professionellen Einsatz bewährt hat.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Toilettensitzerhöhung besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt!

## **1. Achtung - Sicherheitshinweise! (Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485)**

- Max. Benutzergewicht 200 kg!
- Die Belastbarkeit bezieht sich nicht auf den Deckel der Toilettenbrille. Der Deckel ist nicht zum Sitzen geeignet!
- Schieben nur auf ebenem und horizontalem Untergrund!
- Im Stand stets beide Bremsräder arretieren!
- Die Toilettensitzerhöhung ist nicht zum Dauersitzen geeignet!
- Auf festen Sitz der Rückenlehenschrauben achten!

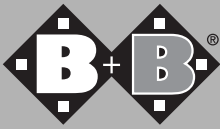

Toilettendeckel

Befestigungsklammer

Toilettenbrille



TSE-Easy 10

## 2. Indikationsbereich

Die Verwendung der Toilettensitzerhöhung ist angezeigt bei Patienten mit fehlender Rumpfkontrolle, Gleichgewichtsstörungen, erheblichen Funktionsausfällen an den unteren Extremitäten, für Hüft- und Wirbelsäulenversteifte bzw. für Ohnhänder, Tetraplegiker oder Armgeschädigte mit erheblicher Störung der Greiffunktion.

## 3. Zusammenbau

- Führen Sie die blaue Kunstoffschraube in die Befestigungsklammer ein. Achten Sie darauf, daß die Nut der Schraube in der Ausbuchtung der Befestigungsklammer festsetzt.
- Führen Sie die zusammengesteckten Befestigungselemente in die Nut des Sitzbeckens ein (Abb. 2)
- Drehen Sie die Kunststoffschraube unter leichtem Druck nach unten in das Gewinde im Sitzbecken.

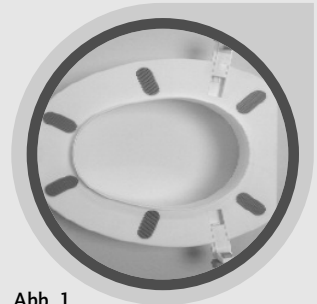



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

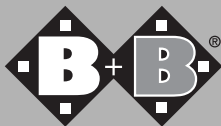

## 4. Montage

- Setzen Sie die TSE-Easy 10 auf Ihre Toilette.
- Befestigen Sie die TSE-Easy 10 mittels der Befestigungsklammern am Toilettenbecken.

Achten Sie darauf, daß die Schrauben fest angezogen werden,so daß die TSE-Easy 10 fest auf der Toilette sitzt.

## 5. Reinigung und Desinfektion

Hinweis zum Wiedereinsatz: Die Reinigung und Desinfektion der TSE-Easy 10 nur mit handelsüblichen Mitteln vornehmen. Keine ätzenden Reinigungsmittel benutzen.

## 6. Technische Daten

Sitzbreite:	36 cm
Sitztiefe:	39 cm
Erhöhung der Sitzposition:	10 cm
Gesamthöhe:	16 cm
Gesamtbreite:	40 - 48 cm
Gesamttiefe:	40 cm
Gewicht:	1,5 kg
Benutzergewicht:	200 kg
Zubehör:	2 Halteklammern

## **Garantie-Abschnitt**

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Typ: TSE-Easy 10

Seriennummer:\*

(vom Fachhandel einzutragen)

**Fachhändler:**

Datum und Stempel

\* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

## **Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070 • Fax: 0700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

