



	Sitzhöhe	Antriebsräder	Position Adapterplatte	Radgabel
Sitzhöhenumbau Pyro:	42 cm	22"	2. Bohrung von oben	4"
	44 cm	22"	2. Bohrung von oben	4"
	45 cm	24"	2. Bohrung von oben	6" Softgummi
	47 cm	24"	2. Bohrung von oben	6" Softgummi
	50 cm	24"		
	52 cm	24"	3. Bohrung von oben	7"
	54 cm	24"	untere Bohrung	200 x 50 mm
	Sitzhöhenumbau Pyro light:	42 cm	22"	2. Bohrung von oben
44 cm		22"	2. Bohrung von oben	4"
45 cm		24"	2. Bohrung von oben	6" Softgummi
47 cm		24"	2. Bohrung von oben	6" Softgummi
49 cm		24"		
52 cm		24"	3. Bohrung von oben	7"
54 cm		24"	untere Bohrung	200 x 50 mm

Lenkräder	Vorderradgabel Position	Bemerkung
schmal 2-Loch	obere Bohrung	Keine Montage von waagrecht verstellbaren Beinstützen, Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich. Verkürztes Trägerrohr für Fußplatte – nur 55 mm Bodenfreiheit
schmal 3-Loch	mittlere Bohrung	Keine Montage von waagrecht verstellbaren Beinstützen, Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich. Verkürztes Trägerrohr für Fußplatte – nur 65 mm Bodenfreiheit
breit 4-Loch	2. Bohrung von oben	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch breit 4-Loch	mittlere Bohrung 3. Bohrung von oben	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
Standardsitzhöhe = 50 cm (7" PU-Rad/5-Loch Radgabel, breit)		Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch breit 4-Loch	4. Bohrung von oben untere Bohrung	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch	untere Bohrung	
schmal 2-Loch	obere Bohrung	Keine Montage von waagrecht verstellbaren Beinstützen, Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich. Verkürztes Trägerrohr für Fußplatte – nur 55 mm Bodenfreiheit
schmal 3-Loch	mittlere Bohrung	Keine Montage von waagrecht verstellbaren Beinstützen, Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich. Verkürztes Trägerrohr für Fußplatte – nur 65 mm Bodenfreiheit
breit 4-Loch	2. Bohrung von oben	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch breit 4-Loch	mittlere Bohrung 3. Bohrung von oben	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
Standardsitzhöhe = 49 cm (6" Softgummi/4-Loch Radgabel, breit)		Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch breit 4-Loch	4. Bohrung von oben untere Bohrung	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch	untere Bohrung	