



	Sitzhöhe	Antriebsräder	Position Adapterplatte	Radgabel
Sitzhöhenumbau Pyro light XL:	42 cm	22"	2. Bohrung von oben	4"
	44 cm	22"	2. Bohrung von oben	4"
	45 cm	24"	2. Bohrung von oben	6" Softgummi
	47 cm	24"	2. Bohrung von oben	6" Softgummi
	50 cm	24"		
	52 cm	24"	3. Bohrung von oben	7"
	54 cm	24"	untere Bohrung	200 x 50 mm

Sicherheitshinweis!

Bei Sitzhöhenumbauten unter der Standardsitzhöhe von 50 cm reduziert sich die maximale Belastbarkeit des Pyro light XL auf 125 kg!

Lenkräder	Position Vorderradgabel	Bemerkung
schmal 2-Loch	obere Bohrung	Keine Montage von waagrecht verstellbaren Beinstützen, Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich. Verkürztes Trägerrohr für Fußplatte – nur 55 mm Bodenfreiheit
schmal 3-Loch	mittlere Bohrung	Keine Montage von waagrecht verstellbaren Beinstützen, Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich. Verkürztes Trägerrohr für Fußplatte – nur 65 mm Bodenfreiheit
breit 4-Loch	2. Bohrung von oben	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 4-Loch	3. Bohrung von oben	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
ab Standardsitzhöhe = 50 cm (7" PU-Rad/5-Loch Radgabel, breit)		Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch	4. Bohrung von oben	Keine Montage von Beinstützenverlängerung oder winkelverstellbarer Fußplatte möglich.
breit 5-Loch	untere Bohrung	