

Protokollblatt bitte kopieren und Kopie verwenden

Kunde:

	Rollator Rollator BXL	RL - 120 RL - 120 vario	Delta B	SRL 100	Rezi Gebo	VFG GS - L/R			
Baugruppe 1 - Rahmen - Gehäuse									
Standprüfung (Montage- Richtplatte)	X	X	X	X	X	X			
Sichtprüfung (Lack / Chrom / Polster)	X	X	X	X	X	X			
Falt- / Klappmechanismus überprüfen	X	X	X	X	X	X			
Kontrolle der Konstruktion (Schweißnähte, Lötstellen etc.)	X	X	X	X	X	X			
Federstifte kontrollieren					X	X			
Baugruppe 4 - Räder vorne									
Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X					
Spiel Lenklager überprüfen	X	X	X	X					
Position der Castorbuchse überprüfen	X		X	X					
bei Luftbereifung Druck überprüfen	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar					
Baugruppe 5 - Räder hinten									
Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X					
bei Luftbereifung Druck überprüfen	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar					
Baugruppe 6 - Bremsen									
Bremsspiel einstellen	10mm	5mm	5mm	10mm					
Bremsprüfung (gebremste Räder oder Rollen)	X	X	X	X					
Allgemeine Maßnahmen									
Scharfe Kanten / Grate beseitigen	X	X	X	X	X	X			
Schrauben und Anbauteile (auf festen Sitz und Grate überprüfen)	X	X	X	X	X	X			
Sauberheitskontrolle	X	X	X	X	X	X			
Bedienungsanleitung vorhanden?	X	X	X	X	X	X			

Ergänzend sind die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung zu berücksichtigen !

Ausfüllanleitung:

in Ordnung =

Beschädigung =

Austausch / Ersatz =

Wartung durchgeführt von:

Stempel und Unterschrift

Nächster Service:

Ort / Datum: