


Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

Rezi
Gebo



Enjoy mobility.

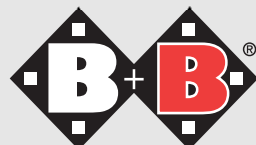

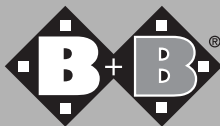

Rezi (andador recíproco)

Gebo (andador fijo, plegable)

Estimado cliente:

Este manual de instrucciones debería ayudarle a familiarizarse con el manejo de su andador B+B y así sentirse más seguro.

Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de una mayor movilidad.

1. Cómo desplegar el andador

Mueva las piezas laterales con asideros hacia fuera hasta que oiga que encajan.

2. Cómo plegar el andador

Apriete el bloqueo telescópico y, simultáneamente, desplace hacia adentro primero el lado derecho y luego el lado izquierdo.

3. Cómo ajustar al altura del bastidor

Presione el perno de resorte y encaje la barra vertical en la posición correcta desde el punto de vista ortopédico.

4. Atención: indicaciones de seguridad. análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485

- 120 kg de capacidad de carga máxima
- Tenga cuidado de no aplastarse los dedos al plegar el andador
- Indicaciones después de ajustar la altura:
 - Asegúrese de la correcta colocación del perno de resorte
 - Ajuste los 4 pies a la misma altura
 - Utilícelo solo sobre una superficie firme y llana

5. Datos técnicos

	Rezi	Gebo
Peso	2,5 kg	2,2 kg
Altura del armazón	82-92 cm	82-92 cm
Barras transversales	3	2
Ajuste de la altura	5x	5x
Color	bronce	bronce
Dimensiones (plegado)		
Anchura	53 cm	58 cm
Profundidad	10 cm	10 cm
Altura	variable	variable

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Rezi / Gebo

Número de serie:*

(debe anotar el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

