


Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

VFG
GS-R/L



Enjoy mobility.

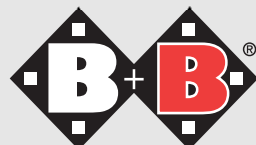

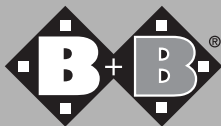

VFG (Bastón de cuatro patas)

GS- R/L (Bastón para diestros y zurdos)

Estimado cliente:

Este manual de instrucciones debería ayudarle a familiarizarse con el manejo de su andador B+B y así sentirse más seguro.

Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de una mayor movilidad.

1. Cómo ajustar la altura del bastón

- Afloje la tuerca de unión
- Presione el perno de resorte y coloque el bastón en la posición ortopédicamente correcta
- Encaje el perno de resorte
- Apriete la tuerca de unión

2. Atención: indicaciones de seguridad, análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485

- 100 kg de capacidad de carga máxima
- Asegúrese de la correcta colocación de las conexiones de enchufe
- Indicaciones después de ajustar la altura:
- Asegúrese de la correcta colocación del perno de resorte
- Asegúrese de que la tuerca de unión esté correctamente fijada
- Utilícelo solo sobre una superficie firme y llana

3. Datos técnicos

	VFG	GS-R/L
Peso	0,8 kg	0,3 kg
Altura	74-97 cm	74-97 cm
Niveles	10	10
Color	Anodizado de bronce	Anodizado de bronce

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: VFG / GS-R/L

Número de serie:*

(debe anotar el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydria oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

