


Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

TSE-Easy 10



Enjoy mobility.

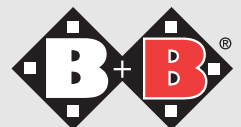

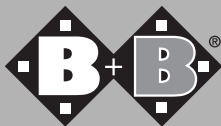

TSE-Easy 10 (Elevación de la tapa del inodoro)

Estimado cliente:

Con la adquisición del accesorio de asistencia para baño B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia en el baño B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de nuestro producto.

1. Atención: indicaciones de seguridad

- 200 kg de capacidad de carga máxima.
- La capacidad de carga no se refiere al asiento del inodoro. No debe sentarse en la tapa.
- La elevación de la tapa del inodoro no es apropiada para estar sentado durante mucho tiempo.
- Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos de fijación.

- Toilettendeckel
- Befestigungsklammer
- Toilettenbrille



TSE-Easy 10

2. Indicaciones

El uso del sistema de elevación de la tapa del inodoro está indicado para pacientes con falta de control del tronco, alteraciones del equilibrio, pérdida de funcionalidad en las extremidades inferiores, rigidez de las caderas y la columna, mocos, tetrapléjicos o personas con lesiones en los brazos y con graves alteraciones de la función de prensión.

3. Ensamblaje

- Introduzca el tornillo de plástico azul en la pinza de fijación. Asegúrese de que la ranura del tornillo quede bien fijada en la convexidad de la pinza de fijación.
- Introduzca los elementos de fijación conectados en la ranura de la taza del inodoro (fig. 2)
- Gire los tornillos de plástico presionando ligeramente la rosca hacia abajo en la taza del inodoro.

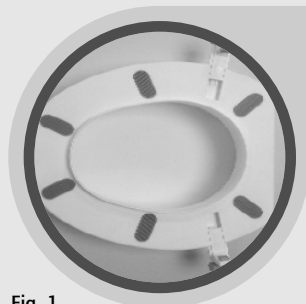



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

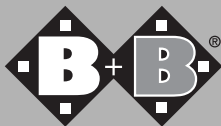

4. Montaje

- Coloque el TSE-Easy 10 en el inodoro.
- Fije el TSE-Easy 10 a la taza del inodoro mediante pinzas de fijación.

Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos para que el TSE-Easy 10 quede fijo al inodoro.

5. Limpieza y desinfección

Indicación para la reutilización: para limpiar y desinfectar el TSE-Easy 10 utilice exclusivamente productos convencionales. No utilice productos de limpieza corrosivos.

6. Datos técnicos

Anchura del asiento:	36 cm
Profundidad del asiento:	39 cm
Elevación de la posición del asiento:	10 cm
Altura total:	16 cm
Anchura total:	40-48 cm
Profundidad total:	40 cm
Peso:	1,5 kg
Peso del usuario:	200 kg
Accesorios:	2 pinzas de sujeción

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: TSE-Easy 10

Número de serie:*

(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

