

Bischoff & Bischoff

Mode d'emploi

Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: Siège de douche Trinidad

Numéro de série:*

(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon

Trinidad



B+B France S.A.R.L.


3 Quai Kléber • F-67000 Strasbourg

Tél.: +33 3 88 23 70 09 • Fax: +33 3 88 23 70 78

www.bischoff-bischoff.com

contact@bischoff-bischoff.com

Enjoy mobility.

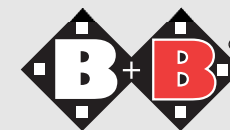

Siège de douche Trinidad (avec dossier)

Chère cliente, cher client,

L'aide pour la douche B+B que vous venez d'acquérir est un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues.

Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre aide pour la douche B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre produit vous apportera une grande satisfaction!

1. Déclaration de conformité

B+B déclare en sa qualité de fabricant que le siège de douche « Trinidad » est totalement conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.

2. Données relatives à l'utilisation du produit

The Trinidad shower stool is designed exclusively for use while showering.

3. Usage conforme - indications

Démarche/maintien instable en cas de réduction/absence fonctionnelle des extrémités inférieures (exemple: perte de force due à une affection maligne, maladies cardiovasculaires et pulmonaires chroniques) avec maintien diminué du tronc.

4. Attention - Consignes de sécurité Analyse des risques conforme à DIN EN ISO 13485

- Pour s'asseoir et se lever, une tierce personne est nécessaire.
- Poids maximal autorisé 120 kg
- Réglez les 4 pieds du siège à la même hauteur
- Vérifiez la solidité des boutons d'arrêt.
- Attention lors de la fixation de l'assise sur le cadre: Risque de pincement.
- Assise uniquement prévue pour s'asseoir.



5. Assemblage et montage

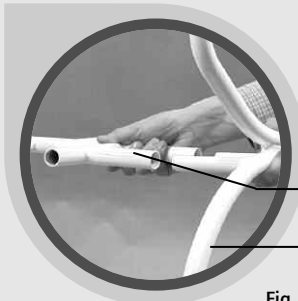


Fig. 1

Insérez la partie latérale dans le cadre de siège et fixez-le par le bas avec les vis taraudeuses (voir figures 1 et 2).

Cadre de siège

Cadre latéral

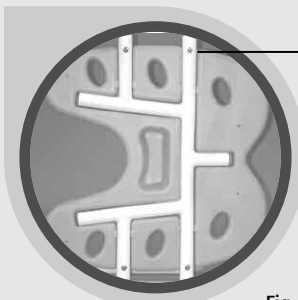


Fig. 2

Vis taraudeuse



Fig. 3

Pour une assise confortable, les poignées et l'évidement doivent être tournés vers l'avant. (Figure 3).

Pour installer le siège sur le cadre, enfoncez-le fortement (voir figure 3).

Pour démonter le siège, tenez au niveau du cadre latéral et retirez le siège du cadre.

6. Montage du dossier

Le dossier est monté sur l'élément latéral du cadre correspondant (voir figure 4) et fixé avec les embouts de fixation dans les ouvertures prévues du cadre et du dossier (voir figure 5).



Fig. 4



Fig. 5

7. Réglage de la hauteur de l'assise

La hauteur des pieds peut être réglée sur 5 positions (plage de réglage: 10 cm).

Pour cela, retirez le verrou et réglez la position souhaitée.

Après le réglage de la hauteur souhaitée, insérez le clip dans l'orifice prévu (voir figure 6 et 7).

Les quatre pieds doivent être réglés à la même hauteur!



Fig. 6

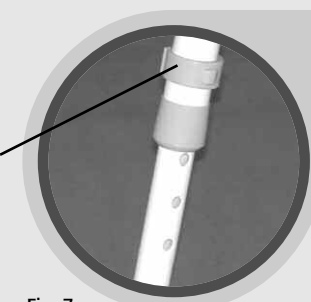


Fig. 7

Clip de sécurité

8. Nettoyage et désinfection du siège de douche

Pour nettoyer et désinfecter le siège, utilisez un produit du commerce.

9. Caractéristiques techniques

- Poids maximal autorisé: 120 kg
- L / P / H (en mm): 510 / 580 / 800-900
- Poids: 4,7 kg
- Hauteur du siège: 455 – 555 mm 5 positions avec clip
- Largeur/profondeur de l'assise: 400 / 400 mm
- Résistance à la chaleur: jusqu'à 125 °C
- Coloris: bleu ou blanc

10. Outils de réglage/réparation

- 1 x tournevis cruciforme
- 1 x clé Allen n°5

11. Identification du produit

Le cadre du produit présente une étiquette d'identification avec la désignation du produit, le numéro de série, le poids maximal de l'utilisateur et l'adresse du fabricant.

12. Garantie

La garantie s'applique uniquement si les conditions d'utilisation et de destination du produit sont respectées.

Tout renvoi du produit doit se faire dans l'emballage d'origine.

13. Livraison du modèle de série

- 1/1x cadre latéral gauche/droite
- 1 x cadre de siège
- 1 x assise B+B (plastique)
- 1 x dossier B+B (plastique)
- 4 x tubes télescopiques
- 4 x chevilles de sécurité
- 1 x jeu de vis
- 2 x rivets aveugles (plastique blanc)