

# Bischoff & Bischoff

Mode d'emploi

## Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: Fauteuil garde-robe à roulettes TS-1 de B+B  
Modèle 2002

Numéro de série:\*  
(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon

**TS-1**



### B+B France S.A.R.L.


3 Quai Kléber • F-67000 Strasbourg

Tél.: +33 3 88 23 70 09 • Fax: +33 3 88 23 70 78

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[contact@bischoff-bischoff.com](mailto:contact@bischoff-bischoff.com)

*Enjoy mobility.*

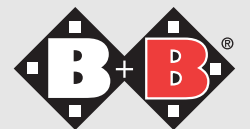

## TS-1 (Fauteuil garde-robe à roulettes)

### Chère cliente, cher client,

Le fauteuil garde-robe B+B que vous venez d'acquérir est un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues.

Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre fauteuil garde-robe B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre produit vous apportera une grande satisfaction et une meilleure mobilité.

### 1. Attention - Consignes de sécurité! (Analyse des risques conforme à DIN EN 13485)

- Poids maximal de l'utilisateur: 120 kg!
- Utilisation du fauteuil garde-robe uniquement avec l'aide d'une tierce personne!
- Déplacez-vous uniquement sur des surfaces planes et horizontales!
- Les deux roulettes à frein doivent être bloquées
- Évitez de vous pencher excessivement sur le côté. Risque de chute!
- Vérifiez que les vis du dossier sont correctement serrées!
- Le fauteuil garde-robe doit être tenu hors de portée de personnes non autorisées (en particulier des enfants)!

L'utilisation du fauteuil garde-robe est indiquée si l'usage ou l'arrivée d'une toilette n'est plus possible à cause d'un handicap.



- Dossier
- Goupille d'arrêt pour accoudoir
- Levier d'arrêt pour repose-pieds
- Repose-pieds
- Roulette directrice avant, sans frein
- Accoudoir amovible
- Accoudoir rabattable avec appui-bras
- Coussin de siège
- Vis de fixation pour dossier
- Seau à toilette avec couvercle
- Roulette directrice arrière, avec frein



Fig. 1

## 2. Freins de stationnement

Les deux roulettes arrière avec frein du fauteuil garde-robe à roulettes préviennent tout déplacement involontaire.

Blocage des roulettes:

- Appuyez avec le pied sur le levier de frein 1 jusqu'à la butée (figure 2).

Déblocage du frein:

- Remontez le levier de frein avec la pointe du pied (figure 2).

## 3. Repose-pieds

Pour vous faciliter autant que possible la montée et la descente de votre fauteuil garde-robe B+B, les repose-pieds peuvent être redressés sans nécessiter de démontage.

- Tirez la goupille d'arrêt légèrement vers l'intérieur (figure 3) pour ouvrir le dispositif de verrouillage.
- Basculez les repose-pieds vers l'extérieur.
- Le cas échéant, redressez auparavant les palettes.
- Pour repositionner les repose-pieds, repoussez-les simplement vers l'avant et laissez la goupille s'enclencher.
- Pour démonter les repose-pieds, procédez comme indiqué ci-dessous:
- Tirez la goupille d'arrêt vers l'intérieur (figure 3) pour ouvrir le dispositif de verrouillage.
- Basculez le repose-pied vers l'extérieur.
- Tirez le repose-pied vers le haut pour l'extraire



### Risque d'accident!

Lorsque vous vous mettez debout, ne prenez jamais appui sur les palettes!



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

#### 4. Siège de toilette

Retrait du siège de toilette:

- Retirez le couvercle d'assise du fauteuil.
- Relevez le siège de toilette.

Pose du siège de toilette:

- Repoussez le bord arrière avec l'ouverture jusqu'à la butée.
- Repoussez le bord avant arrondi de l'assise vers le bas. Le siège doit s'enclencher.
- Vérifiez qu'il est bien fixé.

#### 5. Accoudoirs

Les accoudoirs peuvent être rabattus vers le bas.

- Pour rabattre les accoudoirs vers le bas, retirez le bouton d'arrêt et basculez les accoudoirs vers le bas (figure 4).
- Pour les remettre en place, rabattez les accoudoirs vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez le bouton d'arrêt s'enclencher.



Vérifiez que personne ne se trouve derrière le fauteuil garde-robe à roulettes lorsque vous rabattez les accoudoirs!

#### 6. Caractéristiques techniques

Largeur du siège:	45 cm
Profondeur du siège:	44 cm
Longueur:	96 cm
Hauteur:	97 cm
Largeur:	56 cm
Siège jusqu'aux accoudoirs:	22 cm
Siège jusqu'au dossier:	34 cm
Poids maximal de l'utilisateur:	120 kg
Poids:	15,3 kg