

Bischoff & Bischoff

Mode d'emploi

Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: Rehausse de siège de toilette
réglable en hauteur TSE-A / O de B+B

Numéro de série:*

(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon

TSE-A / O



B+B France S.A.R.L.


3 Quai Kléber • F-67000 Strasbourg

Tél.: +33 3 88 23 70 09 • Fax: +33 3 88 23 70 78

www.bischoff-bischoff.com

contact@bischoff-bischoff.com

Enjoy mobility.

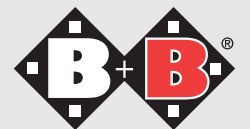

TSE-A/O

(Rehausse de siège de toilette réglable en hauteur)

Chère cliente, cher client,

La rehausse de siège de toilette B+B que vous venez d'acquérir est un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues.

Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre aide sanitaire B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre produit vous apportera une grande satisfaction.

1. Attention - Consignes de sécurité! (Analyse des risques conforme à DIN EN 13485)

- Poids maximal autorisé 150 kg!
- Le poids maximal ne se réfère pas au couvercle de la lunette de toilette. Le couvercle n'est pas conçu pour servir de siège.
- La rehausse de siège de toilette n'est pas conçue pour servir d'assise permanente!
- Les accoudoirs doivent être correctement enclenchés!
- Lorsque vous rabattez les accoudoirs, vérifiez qu'aucun membre de votre corps ni aucun de vos vêtements ne reste coincé!
- Vérifiez que les vis de fixation sont correctement serrées!
- Le réglage de la hauteur doit être le même à l'avant et à l'arrière!



2. Pose des accoudoirs (uniquement pour TSE-A)

Enfoncez les accoudoirs dans les trous prévus à cet effet situés sur la partie arrière de la rehausse de siège de toilette. Appuyez sur le bouton ressort avec le pouce jusqu'à ce qu'il traverse l'orifice.

Lorsque vous rabattez les accoudoirs, vérifiez qu'aucun membre de votre corps ni aucun de vos vêtements ne reste coincé. Vérifiez aussi que les accoudoirs sont bien enclenchés dans les encoches prévues à cet effet.

3. Réglage de la hauteur de l'assise

La rehausse de siège de toilette dispose de 3 positions pour le réglage en hauteur (8, 12 et 16 cm). Pour régler la hauteur, dévissez les deux vis moletées situées à l'arrière de votre rehausse de siège de toilette.

- Ôtez la protection en plastique de l'orifice correspondant à la position souhaitée.
- Faites coulisser la barre en aluminium jusqu'à la position souhaitée et revissez les deux vis moletées.
- Enfoncez les protections en plastique restantes dans les trous libérés.
- Répétez cette opération avec la partie avant de votre rehausse de siège de toilette.

Vérifiez que les deux barres en aluminium sont réglées à la même hauteur.

4. Montage de la rehausse de siège de toilette

- Dévissez la lunette de vos toilettes.
- Dévissez les deux écrous longs en plastique de la barre en aluminium arrière. Placez les deux filets de vis dans les orifices des toilettes.
- Revissez alors les deux écrous longs en plastique par le bas sur les filets de vis.

En fonction de la dimension de la cuvette de vos toilettes, vous devez monter la barre en aluminium arrière tournée de 180° avec les vis de fixation, afin d'éviter le glissement du tube avant de la cuvette des toilettes (voir photos ci-contre à droite).

Vérifiez que les écrous sont solidement vissés et que la rehausse de siège de toilette est ainsi parfaitement stabilisée sur les toilettes.



Espace minimum entre les toilettes et le mur: 18 cm.



Fig. 1



Fig. 2

5. Accoudoirs (uniquement sur TSE-A)

Les accoudoirs sont escamotables. Les accoudoirs s'enclenchent dans les encoches prévues à cet effet à l'aide d'une légère pression vers le bas.

Pour le transfert d'un fauteuil roulant à la rehausse de siège de toilette, les accoudoirs doivent être rabattus en arrière.

Suivez les instructions du Point 1 (Pose des accoudoirs).

6. Entretien et maintenance

Utilisez un nettoyeur ou un désinfectant classique pour nettoyer la rehausse de siège de toilette. N'utilisez aucun produit agressif ou caustique. La rehausse de siège de toilette ne nécessite aucune maintenance.

7. Caractéristiques techniques

Profondeur:	49 cm
Largeur:	58 cm
Hauteur:	37 cm
Hauteur des accoudoirs (à partir de la lunette):	21 cm
Largeur du siège:	40 cm
Profondeur du siège:	40 cm
Poids TSE-A:	6,3 kg
Poids TSE-O:	4,4 kg
Poids maximal autorisé:	150 kg